



1. Revi CELOX pakkaus auki. Käytä suojakäsineitä, mikäli saatavilla.



2. Kuivaa veri haavasta harsotaitoksella.



3. Kaada välittömästi koko pakkauksen sisältö suoraan haavaan.



4. Paina haavaa harsotaitoksella lujasti noin 5 minuutin ajan. Jos verenvuotoa edelleen ilmenee, paina haavaa uudelleen noin 5 minuutin ajan.



5. Sido haava siten, että haava-kohtaan kohdistuu painetta.

VAIN ULKOISEEN KÄYTTÖÖN!

6. Hakeudu lääkärin hoitoon mahdollisimman nopeasti.

7. Näytä tyhjä CELOX-pakkaus lääkintähenkilökunnalle.

8. Tuhoa käyttämättä jäänyt CELOX -jauhe avatusta pakkauksesta.

POTILASTA HOITAVAN HENKILÖKUNNAN HUOMIOITAVAKSI:

Tuote on erittäin imukykyinen ja helposti liukeneva verenvuodon pysäyttävä aine. Vuodon pysäyttävässä reaktiossa ei synny lämpöä. Huuhtelee aine huolellisesti pois haavasta ennen kuin aloitat haavan normaalin hoidon (puhdistus, tuhoutuneen kudoksen poisto, haavan reunojen tasaaminen, ompelu ja peittäminen sidoksella).

CELOX, verenvuodon pysäyttävä imukykyinen rakeinen jauhe (Absorbent Hemostatic Granule), on laboratorioskokeissa pysäyttänyt suuren valtimovuodon hyydyttämällä veren vuotokohdassa kolmessa minuutissa. Laboratorioskokeissa tuote on osoittautunut tehokkaaksi, vaikka veren lämpötila on alentunut 13,3°C asteeseen (hypotermia) ja valmiste on hyydyttänyt myös heparinisoidun veren. Veren lämpötila ei koagulaatiotapahtuman johdosta nouse. CELOX toimii vetämällä puoleensa verisoluja ja sitomalla ne yhteen hyytymäksi.

Tuote on valmistettu äyriäisten kuoren kitosaanista deasetyloimalla. Äyriäisille yliherkille henkilöille valmisteen käsittely ja hoito voi aiheuttaa oireita, vaikka sellaisesta ei ole raportoitu. Valmistetta käytetään haavalle paikallisesti siroteltavana verenvuodon pysäyttävänä jauheena. Tuote on pakattu jauheena pieniin pusseihin ja jauhe kaadetaan suoraan haavan päälle.